




Comfortlift  
Orona



## COMFORTLIFT DIAMANT

LE MONTE-ESCALIER POUVANT  
SUPPORTER JUSQU'À 190 KILOS

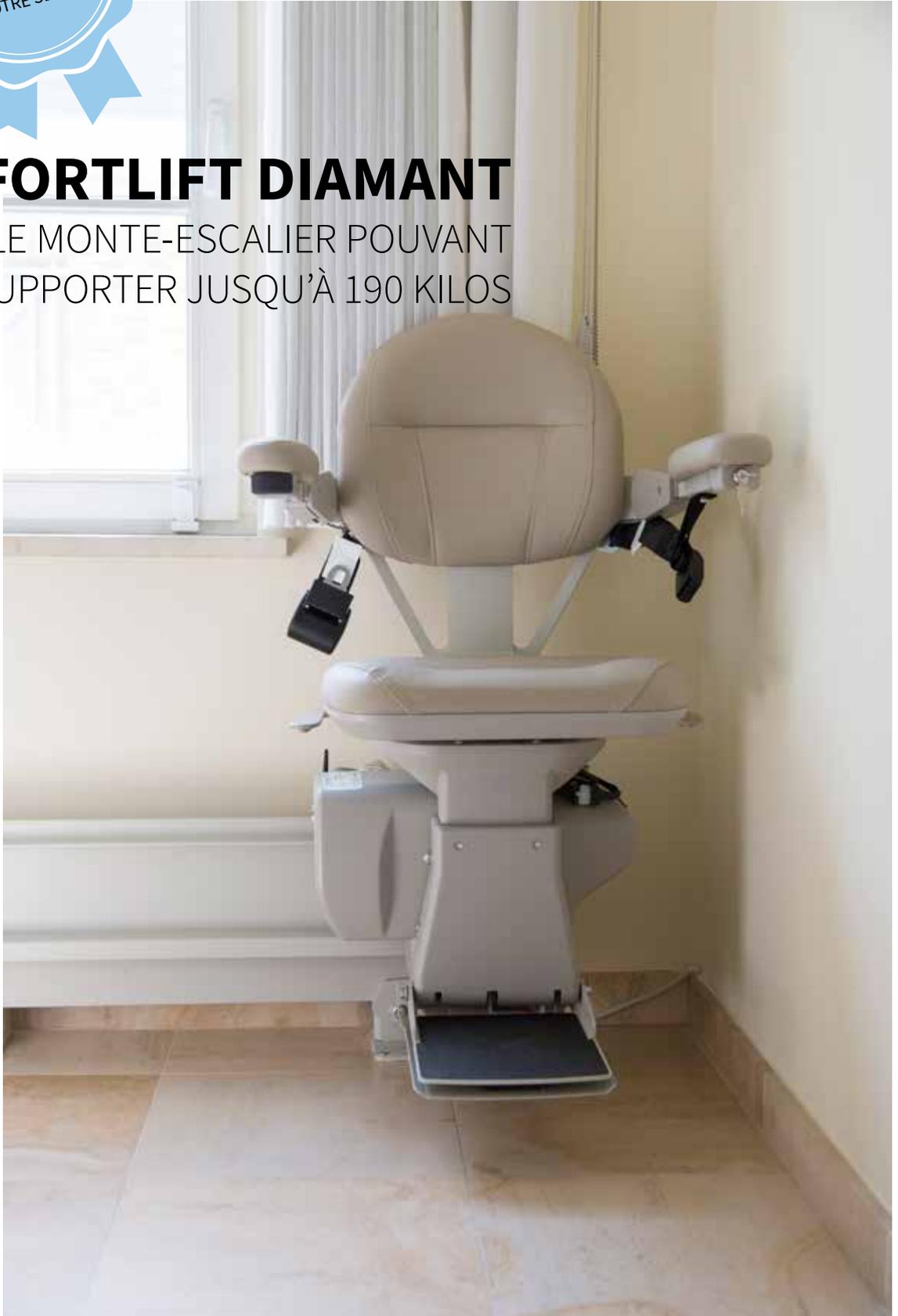

## COMFORTLIFT DIAMANT

Le monte-escalier pouvant supporter jusqu'à 190 kilos

### AVANTAGES DU COMFORTLIFT DIAMANT

- ✓ Capacité portante jusqu'à 190 kg
- ✓ Monte-escalier résistant, pour escaliers droits ou courbes
- ✓ Possibilité d'installation à l'extérieur
- ✓ Siège extra large, réglable en hauteur
- ✓ Repose-pied réglable (repose-pied extra large en option)
- ✓ Accoudoir rabattable et réglable en largeur
- ✓ Points de fixation renforcés
- ✓ Bande de chargement continue



Grâce à sa bande de charge continue sur toute la longueur du rail, les batteries du Comfortlift Diamant se rechargent à n'importe quel endroit de stationnement sur le rail. La commande à distance permet de stationner le monte-escalier n'importe où sur le rail pour ainsi ne pas obstruer le passage ou pour stationner le monte-escalier hors de vue.

## ADAPTÉ À VOS BESOINS

Votre Comfortlift Diamant est entièrement adapté à vos besoins. Vous préférez la version manuelle ou électrique ? A vous le choix !



L'assise pivotante du Diamant peut être actionnée manuellement ou à l'électricité. Si vous optez pour la commande manuelle, il vous suffit d'actionner une poignée pour faire pivoter le monte-escalier. Si votre choix se porte sur la version automatique, une simple pression sur le bouton de l'accoudoir (option) vous permettra de faire pivoter l'appareil.

Le repose-pied peut être commandé de deux manières : soit à l'aide de la poignée, soit en relevant l'assise.

## INTUITIVE ET FACILE À UTILISER

Votre Comfortlift a été conçu pour assurer une facilité d'utilisation. Sa manipulation est très intuitive et deviendra bientôt une seconde nature.

### ÉTAPE 1




Vous appelez le monte-escalier à l'aide de la télécommande sans fil.

### ÉTAPE 2



Vous déployez le siège légèrement et facilement. Vous prenez place sur le siège confortable.

### ÉTAPE 3

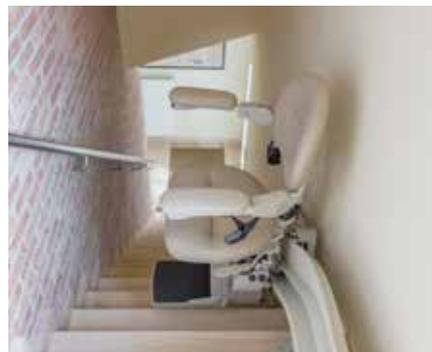

Le monte-escalier démarre silencieusement et continue sa course vers le haut sans bruit et s'arrête automatiquement. Vous pouvez faire pivoter l'assise en haut.


### → SUR

Le monte-escalier fonctionne également en cas de panne de courant.



### → PRATIQUE

Vous déployez et repliez le repose-pieds manuellement ou électriquement.

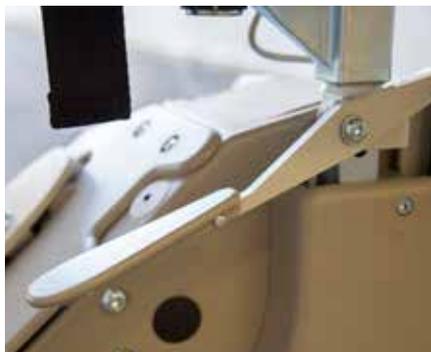

### → SUR

Vous pouvez facilement attacher la ceinture.



### → PRATIQUE

Le monte-escalier est facile à actionner grâce au bouton sur l'accoudoir.



### → SUR

À la moindre résistance, le monte-escalier s'arrête automatiquement.



### → PRATIQUE

Le siège se replie entièrement et s'intègre dans votre intérieur.



## SOLUTIONS INTELLIGENTES



Grâce à son rail anodisé, le Comfortlift Diamant peut également être installé à l'extérieur. La housse étanche protège l'assise lorsque l'appareil n'est pas utilisé.



Votre Comfortlift Diamant est entièrement configuré selon vos besoins. Ainsi, vous pouvez opter pour un rail relevable automatique afin d'économiser de l'espace en bas de votre escalier.




Le design compact du Diamant permet d'économiser de l'espace pour une circulation parfaite de l'escalier. Le rail fin peut être monté jusqu'à 127 mm du mur et une fois les accoudoirs, le siège et le repose-pieds relevés, le Diamant ne prend que 425 mm d'espace.




Le rail du Comfortlift Diamant est fixé au sol pour une résistance accrue.


## DIMENSION DU DIAMANT DROIT

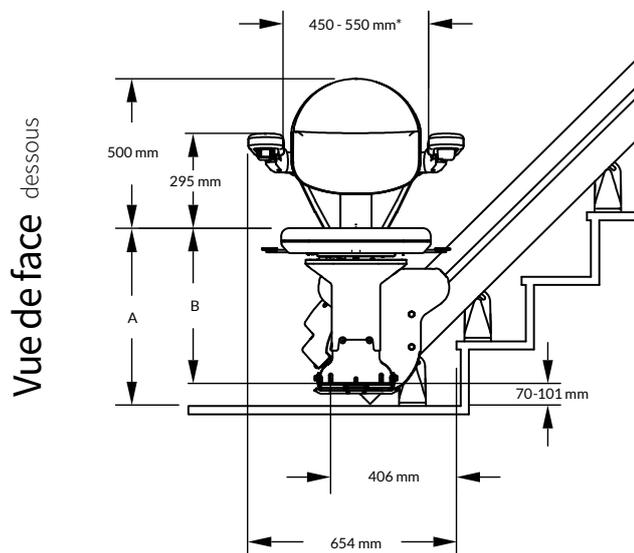


Vue de côté

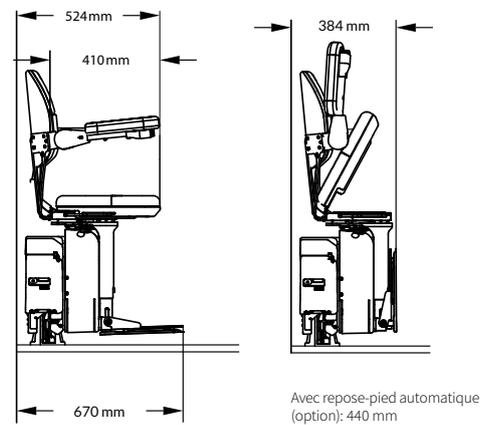

Vue d'en haut

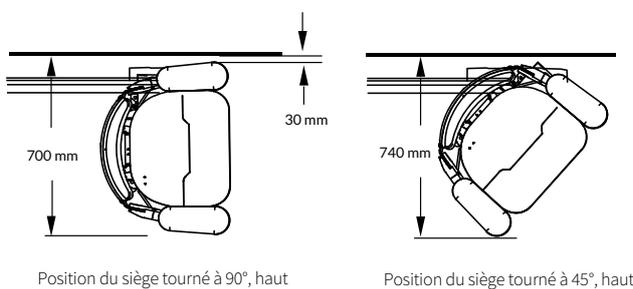

Vue d'en haut

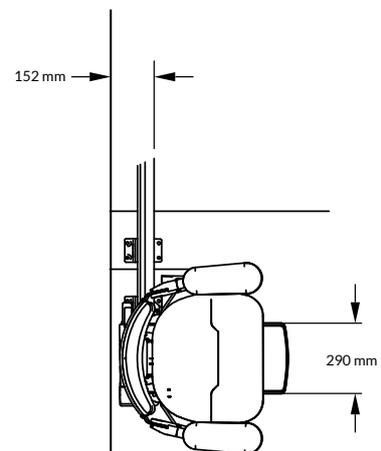

### A. Hauteur du siège


560 mm  
585 mm  
611 mm  
636 mm

### B. Distance assise/repose-pied


minimum 440 mm  
maximum 516 mm

\* Au cas d'une assise XL: 580 mm


## DIMENSION DU DIAMANT AVEC COURBES

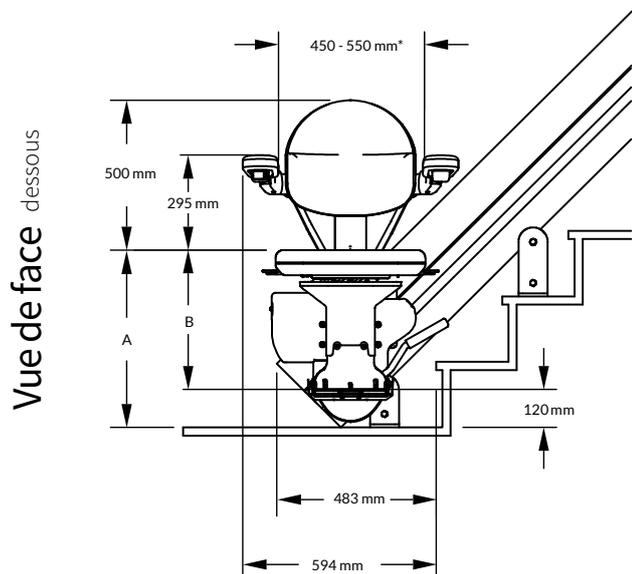

Vue de côté

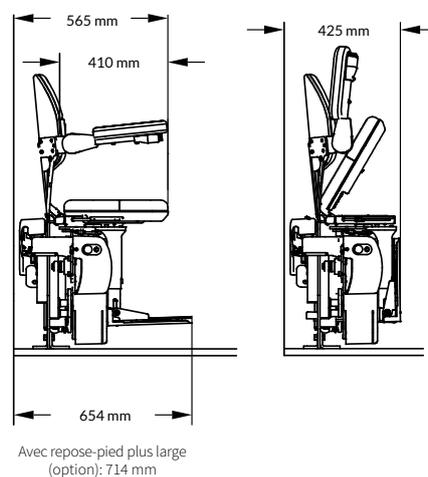


Vue d'en haut

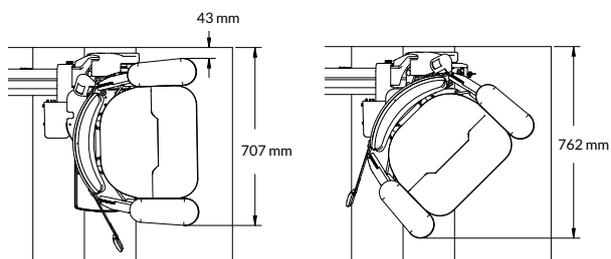

Position du siège tourné à 90°, haut

Position du siège tourné à 45°, haut

Vue d'en haut

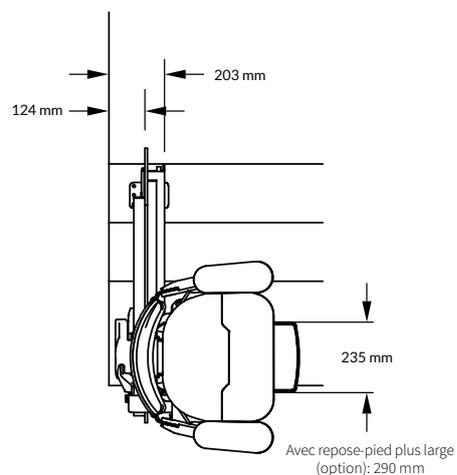

### A. Hauteur du siège

552 mm  
577 mm  
603 mm  
629 mm

### B. Distance assise/repose-pied

minimum 480 mm  
maximum 559 mm

\* Au cas d'une assise XL: 580 mm



## OÙ POUVEZ-VOUS NOUS TROUVER?

(salles d'expo uniquement sur rendez-vous)

### BELGIQUE:

Waregem (showroom):  
Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem

Wemmel (showroom):  
Heide 7 | B-1780 Wemmel

Ascelec Orona:  
Rue du Bosquet 3 | Z.I. des Plenesses  
B-4890 Thimister-Clermont

### LUXEMBOURG:

Peppange :  
Rue de Crauthem 64 | L-3390 Peppange

### PAYS-BAS:

Alphen aan den rijn :  
Curieweg 17 | 2408 BZ Alphen aan den rijn

## COMMENT NOUS CONTACTER ?

Pour obtenir plus d'informations pour une offre ou pour fixer un rendez-vous,

appelez-nous au 0800 20 950

Visitez notre site web : [www.comfortlift.be](http://www.comfortlift.be)

## POURQUOI CHOISIR POUR COMFORTLIFT ORONA?

- ✓ La gamme la plus complète de monte-escaliers en Belgique
- ✓ Toujours à la mesure de votre escalier
- ✓ Plus de 50 ans d'expertise et de savoir-faire
- ✓ Personnel motivé et spécialisé
- ✓ Service 24 h/24
- ✓ Service de proximité : toujours quelqu'un dans votre région
- ✓ Entretien abordable et service après-vente
- ✓ Le fidèle partenaire des mutualités, du pouvoir subsidiant et d'autres prestataires de soins depuis de nombreuses années
- ✓ Offre et conseils sans engagement

APPELEZ  
GRATUITEMENT!  
0800 20 950

